

## QUICKTIP

# Chargeur standard et chargeur pour intra-auriculaires



Le chargeur standard fait office de station de charge portable, de kit de séchage et de boîtier pour aides auditives standard rechargeables au lithium-ion, notamment RIC R et BTE R. Le chargeur pour intra-auriculaires fait office de station de charge portable et de boîtier pour aides auditives intra-auriculaires rechargeables au lithium-ion. Les deux chargeurs doivent être branchés à une source d'alimentation externe et sont dotés de voyants LED qui indiquent l'état de charge des aides auditives.

## Voyants LED pour état de charge des aides auditives

Sur le devant du chargeur, deux voyants LED renseignent sur l'état de charge des aides auditives.

**REMARQUE :** si le chargeur est déchargé, il doit être relié à une source d'alimentation externe (prise murale) afin de fonctionner/charger les aides auditives.

- Lorsque les aides auditives sont insérées dans le chargeur, les voyants situés sur le devant clignotent en vert, indiquant qu'elles sont bien en cours de chargement.
- Lorsque les aides auditives sont complètement chargées, ces mêmes voyants sont verts et fixes pour indiquer que le chargement est terminé.
- Si un problème survient pendant le chargement et que les aides auditives sont à l'état de défaut, les voyants avant clignotent en rouge.

**REMARQUE :** si un état de défaut est signalé, retirez les aides auditives du chargeur, attendez que les voyants s'éteignent puis réinsérez les aides auditives. Si l'état de défaut persiste, contactez votre audioprothésiste.



## Utilisation

---

- 1 Aides auditives standard et intra-auriculaires sont complètement chargées en moins de 3,5 heures.
- 2 Les aides auditives peuvent tout à fait rester dans le chargeur dans la mesure où il n'y a aucun risque de surcharge.
- 3 Le chargement s'effectue avec le couvercle ouvert ou fermé.

**REMARQUE :** *il est recommandé de laisser le couvercle du chargeur standard fermé pour protéger l'absorbeur d'humidité si le boîtier sert aussi de déshumidificateur.*

- 4 Les aides auditives s'allument automatiquement dès qu'elles sont retirées du chargeur et s'éteignent lorsqu'elles sont placées dans le chargeur.
- 5 Si le chargeur n'est pas branché, les voyants situés sur le devant ne s'allument pas et les aides auditives ne s'éteignent pas une fois placées dans le chargeur.