

QUICKTIP

Configuration de l'application Thrive Hearing Control

Version Android



Téléchargement de l'application Thrive Hearing Control

Vous devez disposer d'un compte Google Play Store pour télécharger l'application Thrive. Pour créer un compte Google Play Store, accédez à **Paramètres > Comptes**. Choisissez un compte existant ou sélectionnez **Ajouter un compte** pour créer un nouveau compte.


- 1 Après avoir créé un compte Google Play Store, ouvrez le Play Store.
- 2 Cherchez l'application Thrive Hearing Control.
- 3 Sélectionnez **Installer**.



Configuration initiale de l'application Thrive Hearing Control

Lorsque vous ouvrez l'application Thrive pour la première fois, des écrans d'accueil vous expliquent son fonctionnement.

Appuyez sur **Démarrer** pour commencer la configuration de l'application.

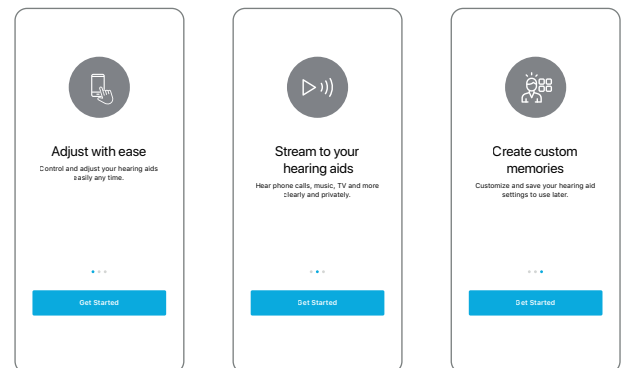

Contrat d'utilisation de Thrive **A**

Lisez le contrat d'utilisation de Thrive et cochez la case pour l'accepter. Appuyez sur **D'accord** pour continuer.


Connexion au Cloud **B**

Connectez-vous en utilisant Facebook ou Google ou créez un compte avec une adresse électronique et un mot de passe.


La connectivité au Cloud permet de sauvegarder et de restaurer TeleHear, Alerte de chute et les informations sur l'application ou les aides auditives. Si vous choisissez Passer l'étape du Cloud, vous pourrez vous connecter ultérieurement en vous rendant dans

Réglages > TeleHear > Connexion sur l'application Thrive.

A

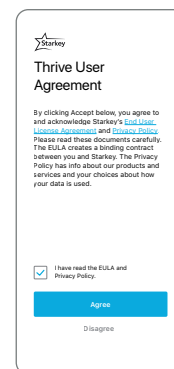


B

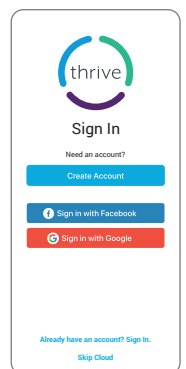

Configuration initiale de l'application Thrive Hearing Control (suite)

Connexion des aides auditives **C**


L'application Thrive recherche les aides auditives et procède au jumelage. Une fenêtre vous informe qu'une autorisation de localisation est nécessaire. Appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite **Autoriser**. Une fois que l'application a détecté les aides auditives, ces dernières s'affichent à l'écran. Appuyez sur chaque aide auditive pour les sélectionner. Appuyez ensuite sur **Connexion**. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **OK** pour connecter les aides auditives.

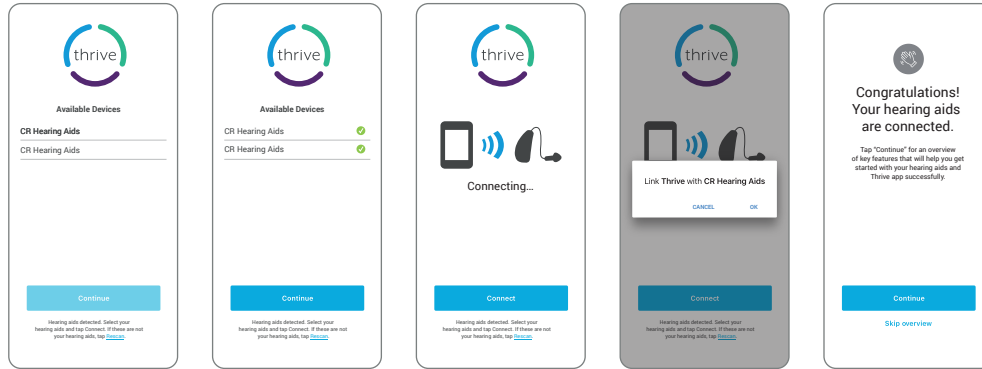

Vue d'ensemble des fonctions de Thrive

Une vue d'ensemble des fonctions de l'application Thrive vous présente et vous explique brièvement les réglages et fonctions couramment utilisés. Vous pouvez choisir d'ignorer les écrans d'information ou de configuration en sélectionnant **Ignorer**.

- D** Régler le volume : Vous pouvez tester le réglage du volume des aides auditives. Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre.
- E** Programmes : Vous pouvez tester le changement de programmes. Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre.
- F** Suivi d'engagement & d'activité : Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre.
- G** Localiser mes aides auditives : Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre.
- H** Notifications et rappels : Appuyez sur **Continuer** pour poursuivre.
- I** Assistant Thrive : Pour utiliser l'Assistant Thrive, vous devez autoriser l'application Thrive à accéder au micro du smartphone. Lorsque vous êtes invité à autoriser l'application à enregistrer le son, sélectionnez **Autoriser**.
- J** **Vous voilà prêt**
Appuyez sur **Continuer** pour ouvrir l'application Thrive.

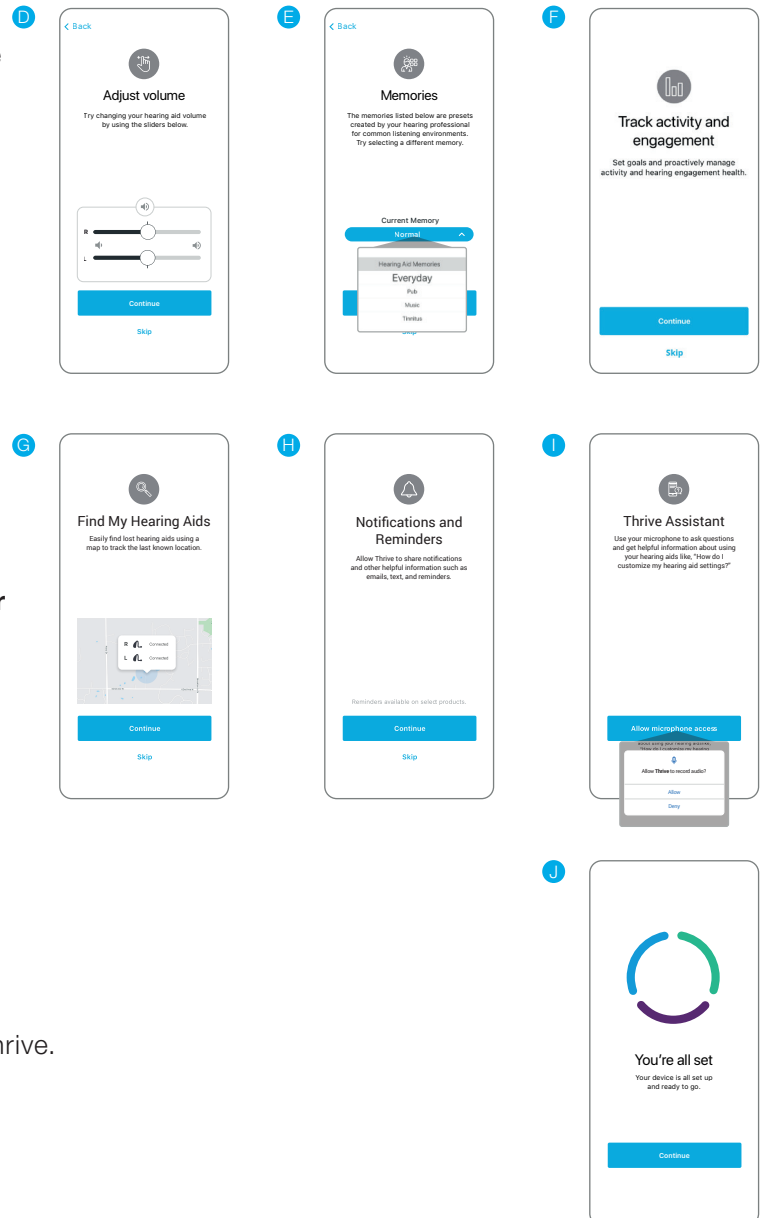


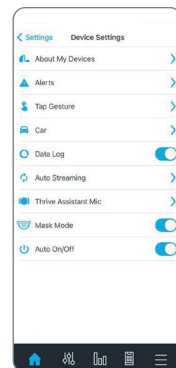
Réglages appareil


Dans ce menu, vous pouvez activer/désactiver ou définir des réglages avancés pour vos aides auditives.

À propos de mes appareils : affiche le modèle, le niveau de technologie et le numéro de série des aides auditives, ainsi que la version actuelle du firmware.

Alertes : si Alertes est activé, un signal sonore retentit dans les aides auditives lors d'un appel téléphonique entrant. Appuyez sur le bouton bleu pour lire les alertes.



Fonction Contrôle tactile : permet d'activer ou de désactiver les fonctions double tap. Le Double tapotement permet de démarrer/arrêter le streaming d'un accessoire, lancer le mode Edge et l'Assistant Thrive. Définissez votre fonctionnalité préférée pour les aides auditives droite et gauche en appuyant sur l'icône en forme de crayon . Réglez la sensibilité tactile sur **Moins**, **Par défaut** ou **Plus**. Disponible sur les aides auditives AI uniquement.



Voiture : permet d'activer ou de désactiver Voiture automatique. Appuyez sur **OK** pour autoriser l'accès au capteur de mouvement du téléphone et permettre un changement de programme automatique dans un véhicule se déplaçant à plus de 16 km/h. Définissez le programme utilisé par le mode Voiture automatique en cliquant sur  et en sélectionnant votre programme préféré.

Data Logging : permet d'activer ou de désactiver le Data Logging. La désactivation du Data Logging supprime la possibilité de générer un score Engagement.

Streaming automatique : permet d'activer ou de désactiver le streaming automatique. Le streaming automatique est activé par défaut après une programmation dans Inspire X. Le streaming automatique utilise Stream Boost par défaut. Si le streaming automatique est désactivé, le programme ne changera pas lors du streaming.

- **Appel téléphonique :** sélectionnez le programme utilisé par le mode Téléphone automatique en cliquant sur  et en sélectionnant votre programme préféré. Choisissez également le mode de fonctionnement des micros d'aide auditive lors du streaming d'un appel téléphonique. Appuyez sur **Aucun changement**, **Diminuer (50 %)** ou **Mode muet** pour indiquer votre préférence.
- **Audio média :** sélectionnez le programme utilisé par le mode Streaming média automatique en cliquant sur  et en sélectionnant votre programme préféré. Choisissez également le mode de fonctionnement des micros d'aide auditive lors du streaming média. Appuyez sur **Aucun changement**, **Diminuer (50 %)** ou **Mode muet** pour indiquer votre préférence.

Auto On/Off : appuyez sur le curseur pour désactiver/activer Marche/Arrêt auto. Marche/Arrêt auto permet aux aides auditives de passer automatiquement en mode économie d'énergie lorsqu'elles sont inutilisées. Disponible sur les aides auditives AI uniquement.

Micro Assistant Thrive : appuyez sur **Micro de l'aide auditive** ou **Micro du téléphone** pour sélectionner le micro utilisé par l'Assistant Thrive. Micro de l'aide auditive est le choix par défaut.

Configuration du score Bien-être

Définissez les informations de suivi d'activité pour que les calculs du score Bien-être soient les plus précis possible.

- Suivi d'activité : personnalisez les objectifs du score Activité, parmi lesquels Marcher, Bouger et Se lever. Les informations peuvent être modifiées à tout moment dans **Réglages > Score Bien-être > Suivi d'activité**.

REMARQUE : le streaming direct n'est compatible qu'avec certains appareils Android. Pour tous les autres modèles de smartphones Android, les aides auditives et le Microphone + 2,4 GHz fonctionnent ensemble pour offrir des conversations téléphoniques mains-libres avec streaming binaural. Musique, films, indications GPS et autres sons peuvent également être transmis directement dans les aides auditives via le Microphone +. Pour en savoir plus, consultez le QuickTIP Microphone +.

Liste de compatibilité : <https://www.starkey.fr/aides-auditives/applications/thrive-hearing-control/compatibilite>

L'application peut varier légèrement selon le modèle de votre téléphone et/ou de vos aides auditives.

Le logo Starkey, Thrive, le logo Thrive, Inspire et TeleHear sont des marques de Starkey Laboratories, Inc. | Android, Google et Google Play sont des marques de Google LLC.

© 2022 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 02/22 FLYR3480-03-FF-ST