


Détection et alertes de chute

Configuration du système

Utilisateur

Assurez-vous que les fonctions Alerte auto et/ou Alerte manuelle ont été activées dans les aides auditives par votre audioprothésiste. Une configuration complémentaire est requise dans l'application Thrive Hearing Control pour que le système soit actif.

- 1 Chargez l'application Thrive :**
Pour en savoir plus, consultez les QuickTIPS Configuration de Thrive Hearing Control. La fonction Alerte de chute est disponible aussi bien en mode avancé qu'en mode basique.
- La fonction Alerte de chute nécessite une connexion au Cloud ; veuillez vous assurer que vous êtes connecté.
- Pour commencer la configuration, sélectionnez **Réglages > Alerte de chute**.
- Les fonctions Alerte auto et/ou Alerte manuelle seront cochées si elles ont été activées par votre audioprothésiste. Appuyez sur **Commencer Configuration Alerte de chute**.
- Familiarisez-vous avec les signaux d'alerte en appuyant sur chaque bouton pour les écouter.

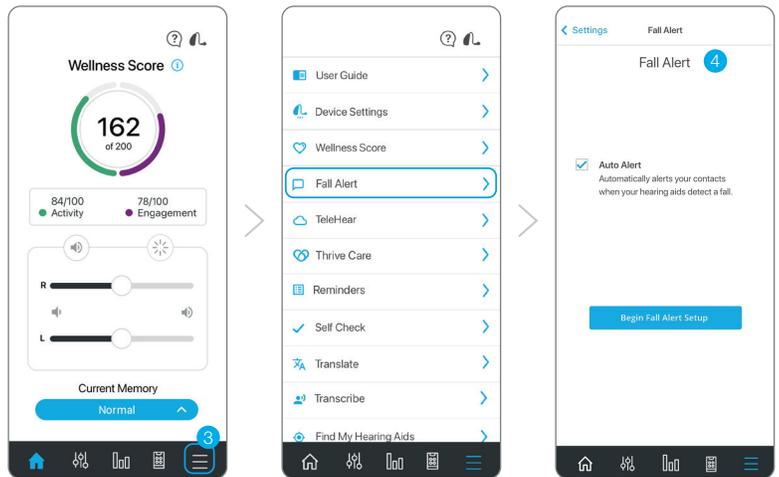

Alerte auto envoyée



Alerte manuelle envoyée



Alerte reçue




Pas d'alerte envoyée



Échec de la communication


Utilisateur (suite)

- 6 Saisissez ensuite votre nom tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans le message d'alerte envoyé à vos contacts. Un message d'alerte type est affiché pour vérification.
- 7 Saisissez le nom et le numéro de portable de trois contacts maximum afin qu'ils reçoivent des messages d'alerte. Chaque contact doit confirmer sa participation dans les 72 heures. Les contacts seront mis « En attente » et le système restera inactif jusqu'à ce qu'au moins un contact ait confirmé sa participation.

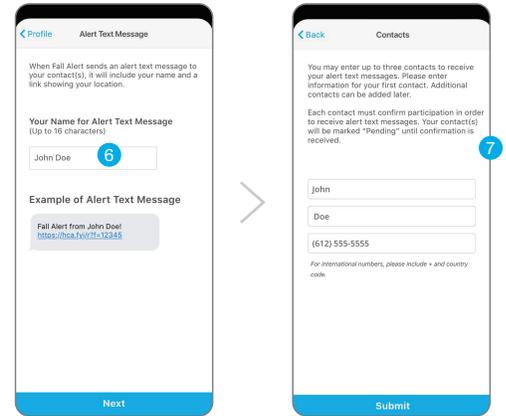

Contact

Chaque contact saisi par l'utilisateur recevra un message lui demandant de participer au système de détection et d'alerte de chute. Une même personne peut être le contact de plusieurs utilisateurs d'aides auditives.

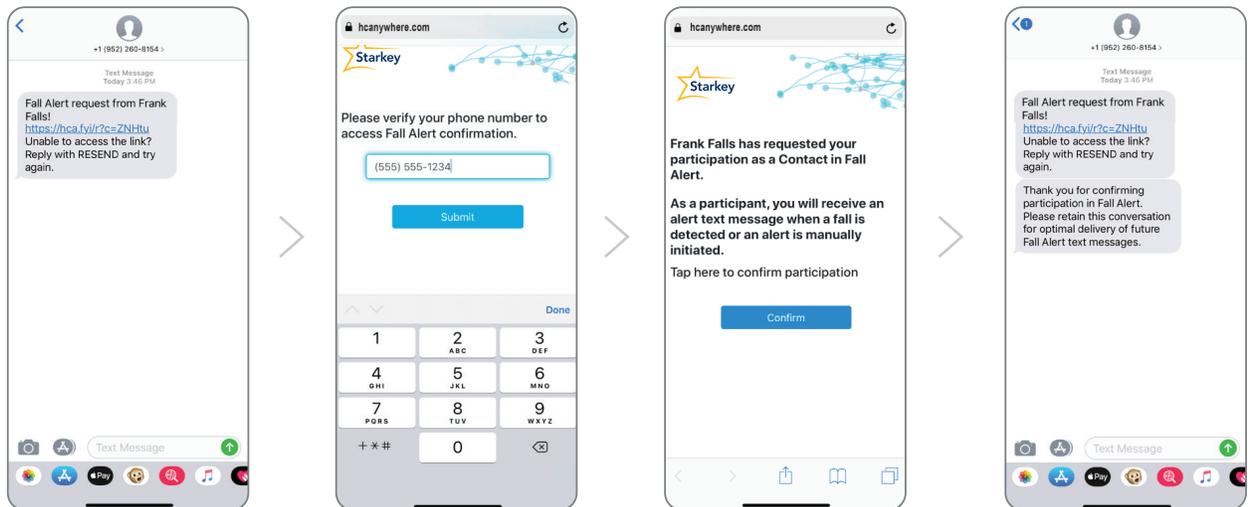

1

Cliquez sur le lien contenu dans l'invitation par message.

2

Saisissez son numéro de portable.

3


Sélectionnez **Confirmer** pour confirmer votre participation au système de détection et d'alerte de chute.

4

Le contact reçoit un message confirmant sa participation.


Désinscription du contact

Pour se désinscrire du système de détection et d'alerte de chute, un contact peut cliquer sur le lien de désinscription contenu dans le message initial de confirmation de participation ou se rendre sur www.starkey.com/contact-starkey-hearing.

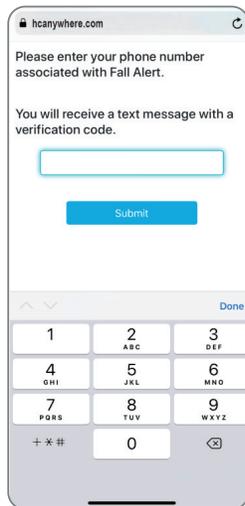


1

Saisissez son numéro de portable pour recevoir un code de vérification par message.

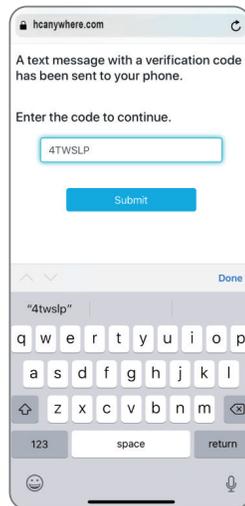

2

Saisissez ce code de vérification.

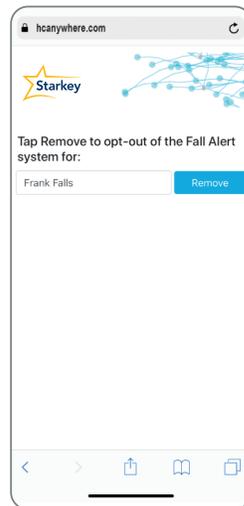

3

Sélectionnez **Supprimer** à côté du nom pour se désinscrire.



4


L'utilisateur est informé de la désinscription d'un contact.

Système actif


La confirmation de la participation d'au moins un contact est nécessaire pour que le système soit actif. La bannière figurant sur l'écran Alerte de chute devient alors verte et indique **Système actif**.

Une fois qu'un contact a confirmé sa participation, la mention « En attente » disparaît à côté de son nom.

Une fois que la fonction Alerte de chute est active, une chute peut être automatiquement détectée ou une alerte manuelle déclenchée.

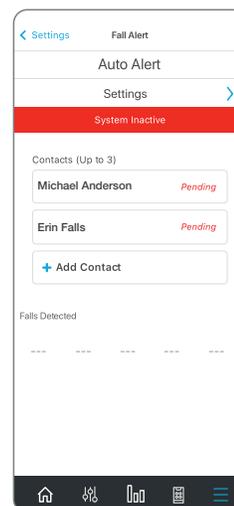

Inactif

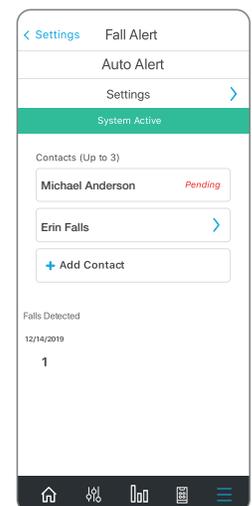

Actif

Les notifications de la fonction Alerte de chute ne sauraient se substituer à des services d'urgence et ne contactent aucunement les services d'urgence

Les notifications de la fonction Alerte de chute sont simplement un outil susceptible d'aider à transmettre certaines informations à des contacts tiers que l'utilisateur a préalablement identifiés. L'application Thrive n'est pas en communication avec les services d'urgence, n'apporte en aucune façon une assistance d'urgence et ne saurait être considérée comme remplaçant un appel à des services d'urgence professionnels. La fonction Détection de chute de l'application Thrive dépend de la connectivité sans fil aussi bien pour l'utilisateur que le(s) contact(s) désigné(s) de l'utilisateur et ne peut transmettre de message si la connectivité Bluetooth® ou cellulaire est perdue ou interrompue à un moment donné. La connectivité peut être perdue pour diverses raisons, notamment : le dispositif mobile jumelé est hors de portée des aides auditives ou perd autrement sa connectivité avec les aides auditives ; les aides auditives ou le dispositif mobile ne sont pas allumés ou n'ont pas assez de puissance ; le dispositif mobile est en mode avion ; le dispositif mobile tombe en panne ; ou le mauvais temps interrompt la connectivité du réseau du dispositif mobile.

La fonction Alerte de chute est un produit de bien-être général (non réglementé comme un dispositif médical)

La fonction Alerte de chute est conçue et distribuée comme un produit de bien-être général. La fonction Alerte de chute n'est aucunement conçue pour ni destinée à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir une maladie spécifique ou un problème médical particulier et ne s'adresse aucunement à une population spécifique ou particulière. Au contraire, la fonction Alerte de chute est uniquement conçue pour détecter la chute éventuelle d'un utilisateur et essayer d'envoyer un message en réponse à cet événement, en soutien à l'état de santé général de l'utilisateur.

Des informations complémentaires sont disponibles dans le guide d'utilisation des aides auditives et le contrat de licence d'utilisation de Thrive, disponible dans l'application Thrive et qui doit être lu et accepté avant que ne soit utilisée l'application Thrive.

Les fonctions peuvent varier selon le pays.

Cette application peut être légèrement différente selon le modèle de votre téléphone.

Thrive et le logo Starkey sont des marques de Starkey Laboratories, Inc.

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Starkey est sous licence.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPod touch, App Store et Siri sont des marques déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2022 Starkey Laboratories, Inc. Tous droits réservés. 02/22 FLYR3517-03-FF-ST