

## QUICKTIP

# Mini Microphone déporté 2,4 GHz



## Jumelage

Le Mini Microphone déporté 2,4 GHz doit être jumelé pour interagir avec les aides auditives 2,4 GHz compatibles utilisant la plateforme Thrive. Le jumelage ne doit être réalisé qu'une seule fois, les aides auditives et le Mini Microphone déporté se reconnaissant ensuite automatiquement. Le Mini Microphone déporté peut être jumelé dans ou en dehors d'Inspire X.

### Jumelage dans Inspire X

- 1 Lancez Inspire X puis connectez les aides auditives afin de les détecter.
- 2 Sélectionnez **Accessoires** dans la barre de navigation de gauche.
- 3 Veillez à ce que le Mini Microphone déporté soit allumé.
- 4 Placez les aides auditives à moins de 15 cm du Mini Microphone déporté.
- 5 Activez le mode jumelage du Mini Microphone déporté en double-cliquant sur le bouton Marche/Arrêt. Le voyant d'état clignote alternativement en rouge et en bleu.
- 6 Sélectionnez **Jumeler** pour mettre les aides auditives en mode jumelage. (A)
- 7 Le jumelage est effectif lorsque l'image du Mini Microphone déporté apparaît sur l'écran Accessoires. (B)
- 8 Utilisez le menu déroulant sous la fenêtre Accessoires de streaming pour sélectionner « Micro d'aide auditive lors du streaming ». (C)
- 9 Si nécessaire, cliquez sur l'icône d'information pour en savoir plus sur le processus de jumelage. (D)




### Mise sous tension

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes et relâchez-le lorsque le voyant s'allume.



### Mise hors tension

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 2 secondes et relâchez-le lorsque le voyant s'éteint.

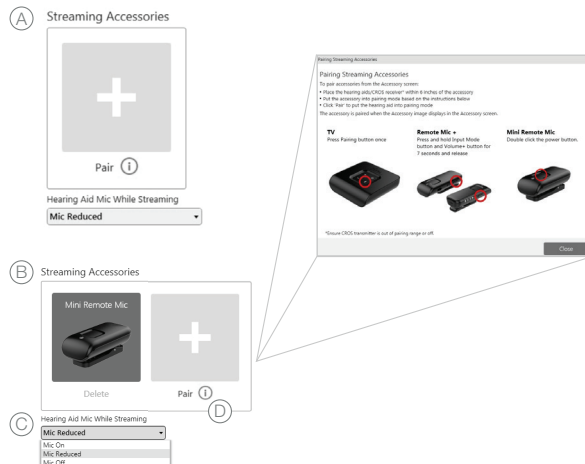


## Jumelage (suite)


### Jumelage en dehors d'Inspire X

- 1 Éteignez tout téléphone portable ou autre accessoire déjà jumelé aux aides auditives.
- 2 Veillez à ce que le Mini Microphone déporté soit allumé.
- 3 Éteignez puis rallumez les aides auditives pour passer en mode jumelage.
- 4 Placez les aides auditives à moins de 15 cm du Mini Microphone déporté.

- 5 Activez le mode jumelage du Mini Microphone déporté en double-cliquant sur le bouton Marche/Arrêt. Le voyant d'état clignote alternativement en rouge et en bleu.
- 6 Un voyant vert clignotera pour chaque aide auditive pour confirmer que le jumelage est réussi.

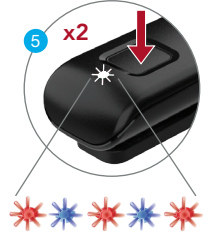


### Comment ça marche ?

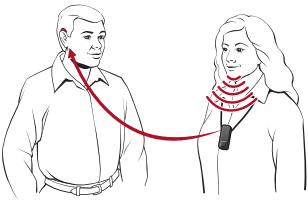

Le Mini Microphone déporté permet à l'utilisateur des aides auditives de se concentrer sur une seule personne en présence de

bruit de fond. Bien que non optimisé pour être utilisé comme micro omnidirectionnel posé sur une table, le Mini Microphone déporté peut être utile pour regarder la télévision. Il suffit de le poser près des haut-parleurs du téléviseur. Pour obtenir un niveau d'écoute confortable, réglez la distance du micro déporté par rapport aux haut-parleurs du téléviseur ou modifiez le niveau de volume du streaming audio.

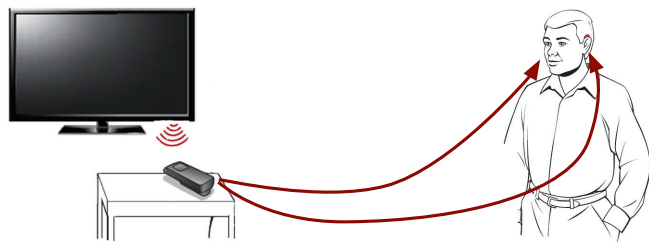

### Pour lancer le streaming à partir du Mini Microphone déporté :


- 1 Veillez à ce que le Mini Microphone déporté soit allumé en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.
- 2 Le streaming démarre automatiquement dans les aides auditives.
- 3 Pour arrêter le streaming, il suffit d'éteindre le micro déporté.

### Le streaming audio s'arrête également lorsque :

- Le Mini Microphone déporté est éteint.
- Un appel téléphonique est reçu via un streaming téléphonique direct dans les aides auditives. Une fois l'appel téléphonique terminé, tout streaming est interrompu. Le cas échéant, le streaming audio du Mini Microphone déporté doit être redémarré manuellement.
- Si l'utilisateur se trouve hors de portée du Mini Microphone déporté (jusqu'à 20 mètres), le streaming s'arrête et doit être relancé manuellement.

## Utilisation

- Le Mini Microphone déporté peut être jumelé à une paire d'aides auditives 2,4 GHz utilisant la plateforme Thrive.
- Le Mini Microphone déporté peut être fixé à un vêtement ou porté avec un cordon.
- La distance de fonctionnement du Mini Microphone déporté est d'environ 20 m.
- Placez le Mini Microphone déporté près de la source audio pour des résultats optimaux. Il est préférable que le Mini Microphone déporté se trouve à moins de 20 cm de la bouche du locuteur.
- Pleinement chargé, le Mini Microphone déporté peut assurer jusqu'à 10 heures de streaming.
- Le Mini Microphone déporté atteint sa pleine charge en moins de 3 heures et peut être à moitié rechargé (50 %) en environ 1 heure.

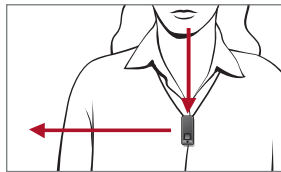

- Lorsque la batterie du Mini Microphone déporté est faible, le voyant d'état clignote lentement en rouge et un signal sonore retentit dans les aides auditives toutes les 5 minutes.
- Le Mini Microphone déporté se désactive momentanément en cas de chute et se réactive une fois stabilisé.
- Il est possible de Démarrer/Arrêter manuellement le streaming via les contrôles utilisateur des aides auditives, la télécommande 2,4 GHz, l'application Thrive Hearing Control et/ou en allumant ou éteignant le Mini Microphone déporté.
- Le volume du streaming peut être réglé via l'application Thrive, la télécommande 2,4 GHz et/ou les contrôles utilisateur des aides auditives.