


QUICKTIP

Mini Turbo Chargeur

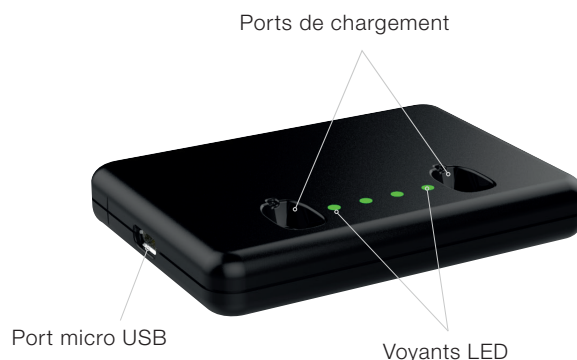

Comment ça marche ?

Le Mini Turbo Chargeur est un chargeur de poche pour aides auditives rechargeables standard au lithium-ion. Il fonctionne aussi bien branché sur secteur qu'en mode nomade grâce à sa batterie intégrée capable de recharger jusqu'à quatre fois une paire d'aides auditives.

- 1 Placez les aides auditives dans le Mini Turbo Chargeur, écouteurs/embouts orientés/positionnés vers/à l'extérieur du boîtier.
- 2 Les aides auditives s'éteignent automatiquement et commencent à se charger.
- 3 Pour chaque aide auditive, des voyants s'allument pendant 10 secondes puis s'éteignent afin de préserver la batterie.
 - (A) Vert clignotant = en charge
 - (B) Vert fixe = charge terminée
 - (C) Rouge clignotant = état de défaut
 - (D) Quatre voyants clignotant en série = chargement express
- 4 Les aides auditives seront complètement chargées en moins de trois heures.



Chargement express

Le chargement express a lieu lorsque la batterie de l'aide auditive ou celle du chargeur sont presque à plat.

- Les quatre témoins LED clignotent en série pendant le chargement express.
- Le chargement express dure jusqu'à ce que la batterie soit chargée à 20 % (max. 7 minutes).
- Un chargement express des aides auditives permet de les utiliser pendant 3 heures et demie.
- Aides auditives et Mini Turbo Chargeur peuvent être rechargés en mode express en même temps si le chargeur est relié au secteur.

Utilisation

- La batterie intégrée permet de charger les aides auditives sans que le Mini Turbo Chargeur ne soit relié au secteur.
- Les aides auditives peuvent tout à fait rester dans le Mini Turbo Chargeur une fois qu'elles sont pleinement rechargées. Il n'y a pas de risque de surcharge.
- Les aides auditives s'allument automatiquement lorsqu'elles sont retirées du Mini Turbo Chargeur et s'éteignent lorsqu'elles sont placées dans le chargeur.
- L'état de charge des aides auditives se vérifie aisément en tapotant simplement deux fois sur le dessus du Mini Turbo Chargeur.
- Pour que la batterie du chargeur reste à pleine capacité, il est nécessaire de charger le Mini Turbo Chargeur une fois toutes les trois semaines.
- L'état de la batterie intégrée n'est visible que s'il n'y a pas d'aides auditives dans le chargeur.
- Voyants LED d'état de charge de la batterie intégrée :
 - Ⓐ 4 voyants fixes > 75 %
 - Ⓑ 3 voyants fixes < 75 %
 - Ⓒ 2 voyants fixes < 50 %
 - Ⓓ 1 voyant fixe < 25 %
 - Ⓔ 1 voyant clignotant = charge faible, relier à une source électrique pour recharger la batterie intégrée
- Conservez le Mini Turbo Chargeur dans sa pochette s'il n'est pas utilisé ou pour le transporter.