

## QUICKTIP

# Protocole d'adaptation initiale Rechargeable



## Configuration initiale/Chargement

- 1 Les aides auditives rechargeables 2,4 GHz utilisant la plateforme Thrive ne peuvent être programmées qu'en mode sans fil via le programmateur sans fil 2,4 GHz ou NOAHLink. Les aides auditives sont livrées avec une batterie suffisamment chargée pour en permettre la programmation initiale mais non l'utilisation sur une journée complète.
- 2 Pour être certain d'avoir une autonomie suffisante, rechargez les aides auditives dans le chargeur avant de procéder à l'adaptation initiale.

**REMARQUE :** si la charge de la batterie des aides auditives est trop faible, un message de batterie faible apparaît à la lecture des aides auditives. Dans ce cas, la session d'adaptation peut être réalisée mais il est impossible de mettre à jour le firmware (le cas échéant). Quinze minutes dans le chargeur standard ou le chargeur pour intra-auriculaires ou un chargement express de 7 minutes à l'aide du Mini Turbo Chargeur suffisent pour mettre à jour le firmware.

**REMARQUE :** le chargeur standard et le chargeur pour intra-auriculaires doivent être reliés à une source d'alimentation externe (une prise murale) pour fonctionner/charger les aides auditives. Le chargeur standard Premium et le chargeur pour intra-auriculaires Premium ont une batterie intégrée qui leur permet de charger les aides auditives sans être reliés au secteur.

## Démarrer

- 1 Lancez **Inspire X**.
- 2 Sur l'écran **Accueil**, sélectionnez **Afficher les programmeurs** puis choisissez le programmateur sans fil 2,4 GHz et cliquez sur **OK**.

**REMARQUE :** la portée prévue pour la programmation sans fil est d'environ 9 mètres.
- 3 Cochez la **case** en regard des aides auditives à programmer.
- 4 Sélectionnez **Lire les réglages de l'appareil** pour démarrer une nouvelle adaptation ou pour une session de suivi utilisant les réglages en cours des aides auditives. Sélectionnez **Charger une session précédente** pour récupérer une session préalablement enregistrée.
- 5 Sélectionnez **Démarrer**.



## Adaptation initiale et Auto Adaptation

Adaptation initiale se lance automatiquement lors de la programmation de nouvelles aides auditives.

- 1 Sélectionnez les **Options acoustiques** appropriées, puis cliquez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez l'**Expérience de l'amplification** appropriée. [Fig. 1]  
*Pour en savoir plus, consultez le QuickTIP Gestionnaire d'expérience.*
- 3 Insérez les aides auditives dans les oreilles du patient, réduisez toutes les sources de bruit puis sélectionnez **Commencer** pour exécuter l'Auto Adaptation.

**REMARQUE :** si la programmation des aides auditives est réalisée avant le rendez-vous d'adaptation, exécutez à nouveau l'Annulateur de larsens avec les aides auditives dans les oreilles du patient.

- 4 Vérifiez l'écran des résultats de l'Auto Adaptation. Sélectionnez **Redémarrer** si le statut est incomplet pour une étape donnée ou cliquez sur **Fermer** pour continuer.

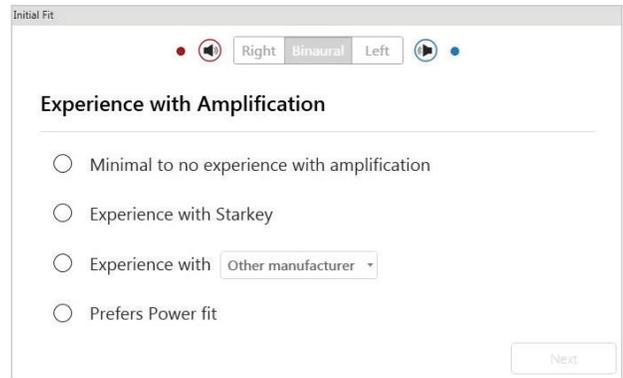


Figure 1

## Contrôles utilisateur

La boîte de démonstration Configuration des contrôles utilisateur apparaît lors de la programmation initiale. Sélectionnez **Montrer la démo** pour une démonstration des options de configuration des contrôles utilisateur, ou sélectionnez **Ne plus afficher** et **Fermer**.

- 1 Prenez le contrôle utilisateur que vous souhaitez activer côté gauche et déposez-le sur une fonction tactile côté droit. Les contrôles utilisateur en option sont : Volume des aides auditives, Programme, Niveau Tinnitus, Muet, Marche/Arrêt accessoire, Volume accessoire, Alerte manuelle, Assistant Thrive et Mode Edge. Les fonctions tactiles en option sont : Pression brève, Pression longue et Double tapotement. [Fig. 2]
- 2 Les aides auditives rechargeables n'ont pas de tiroir pile. Pour que les patients puissent éteindre leur(s) aide(s) auditive(s) rechargeable(s) lorsqu'ils ne les utilisent pas, il est possible de configurer le contrôle utilisateur Pression longue comme option d'« Arrêt ».
- 3 Les aides auditives rechargeables sont livrées avec Pression longue comme contrôle utilisateur d'« Arrêt ».

### REMARQUE :

- Il n'y a pas de synchronisation E2E du contrôle utilisateur pour l'option Arrêt.
- Assistant Thrive, Alerte manuelle et Mode Edge ne sont disponibles que sur certains produits 2,4 GHz utilisant la plateforme Thrive.
- La fonction Double tapotement n'est disponible que sur certaines aides auditives AI.
- Une icône d'alerte apparaît si le contrôle utilisateur Tinnitus est activé mais que le stimulus Tinnitus est désactivé.

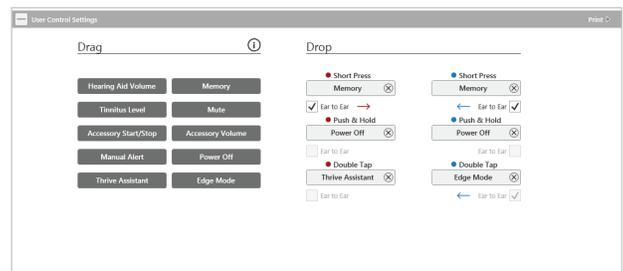


Figure 2

## QuickFit et Réglages avancés

- 1 Sélectionnez **QuickFit** dans la barre de navigation de gauche pour effectuer des réglages d'adaptation généraux. [Fig. 3]
- 2 Cliquez sur les **flèches de défilement Programme** dans la barre des programmes pour paramétrer les programmes.
- 3 Sélectionnez **Réglages avancés** dans la barre de navigation de gauche ou au bas de l'écran QuickFit pour affiner les réglages d'adaptation de chaque canal et niveau d'entrée.
- 4 Sélectionnez **Tableaux** ou **Curseurs** pour choisir la vue souhaitée pour les ajustements.
- 5 Cliquez sur **+** pour développer les groupes de canaux Graves, Médioms ou Aiguës et/ou Ultra.
- 6 Sélectionnez **les canaux et les niveaux d'entrée** à régler puis cliquez sur les flèches haut et/ou bas pour effectuer les ajustements.

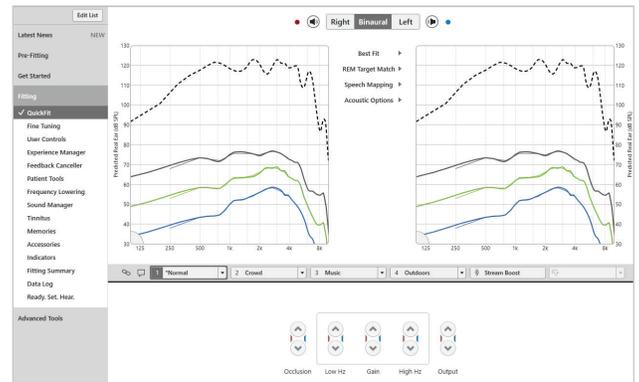


Figure 3

## Outils patient

Sélectionnez **Programmation à distance** sous Outils patient pour activer la programmation à distance. Cliquez sur la **case** en regard de Programmation à distance. Puis cliquez sur **Accepter** après avoir revu l'avis de divulgation avec votre patient. Enfin, cliquez sur l'icône Génération du code pour générer un code unique que votre patient entrera dans son application Thrive afin d'avoir accès à la programmation à distance. [Fig. 4]

Sélectionnez **Alerte de chute auto** sous Outils patient pour modifier la sensibilité de détection des chutes et complétez l'évaluation du risque de chute avec votre patient. Veuillez vous référer au QuickTIP Alerte de chute pour savoir comment configurer et utiliser la fonction. Veuillez noter que la fonction Alerte de chute auto n'est disponible que sur certaines aides auditives 2,4 GHz utilisant la plateforme Thrive. [Fig. 5]

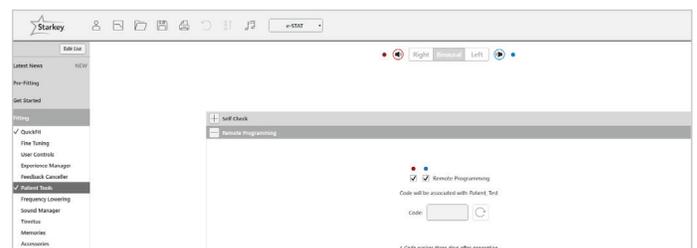


Figure 4

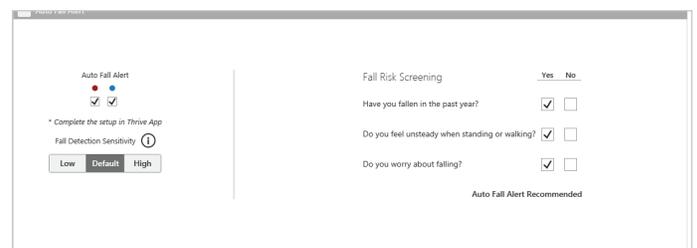


Figure 5

## Réglages supplémentaires

Consultez la bibliothèque des QuickTIPs pour en savoir plus sur les différentes fonctions, par exemple Sound Manager, Tinnitus et Duplication fréquentielle.

## Programmes et Signaux vocaux

Sélectionnez **Programmes** dans la barre de navigation de gauche ou au centre de tous les écrans d'adaptation.

- 1 Cliquez sur les flèches de défilement pour développer le menu **Programmes** puis sélectionnez les programmes souhaités.
- 2 Pour configurer un **programme musique**, consultez le QuickTIP Programme musique.
- 3 Les **signaux vocaux** peuvent être personnalisés. (Voir Signaux page suivante).

## Programmes et Signaux vocaux (suite)

- La barre des programmes affichera par défaut l'environnement sélectionné (par exemple « Plein air »). Cliquez sur la **bulle** pour modifier le nom du signal vocal qui a été configuré (par exemple, le programme Plein air devient « Golf »). [Fig. 6]

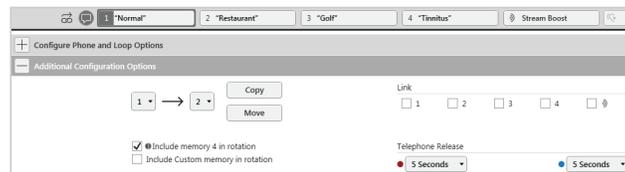


Figure 6

## Accessoires

Sélectionnez **Accessoires** dans la barre de navigation de gauche pour configurer des accessoires 2,4 GHz. [Fig. 7] Suivez les instructions de jumelage fournies par l'icône d'information pour procéder au jumelage dans Inspire X. Une fois le jumelage terminé, paramétrez Micro d'aide auditive lors du streaming pour les accessoires de streaming et Configuration du bouton Favori pour la télécommande.

**REMARQUE :** *comme les aides auditives rechargeables n'ont pas de tiroir pile, il est nécessaire de les insérer dans le Chargeur ou le Mini Turbo Chargeur puis de les en retirer afin de les mettre en mode jumelage si elles sont jumelées à des accessoires en dehors d'Inspire X.*

*Pour en savoir plus, consultez les QuickTIPs sur les accessoires sans fil 2,4 GHz.*

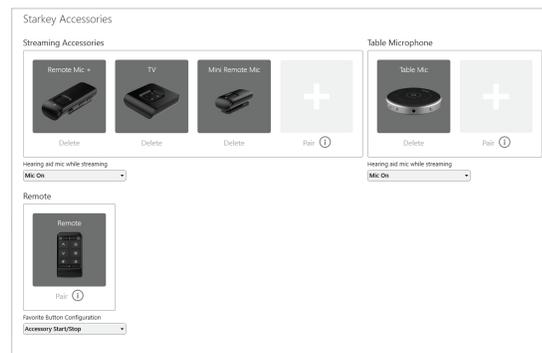


Figure 7

## Signaux sonores

Sélectionnez **Signaux** dans la barre de navigation de gauche.

- Cochez ou décochez les cases pour activer ou désactiver des signaux sonores.

**REMARQUE :** *les signaux de volume peuvent être activés ou désactivés séparément.*

- Sélectionnez **Régler tous les signaux** pour augmenter ou diminuer le volume de tous les signaux sonores, vocaux ou de carillon par pas de 5 dB, ou pour modifier la langue.
- Sous **Signaux individuels**, sélectionnez le nom de chaque signal pour lequel vous souhaitez régler individuellement le volume et le type de stimulus. Sélectionnez l'icône Aide auditive pour que le signal soit directement diffusé dans les aides auditives ou l'icône Ordinateur pour qu'il soit diffusé via les haut-parleurs, à des fins de démonstration.
- Sélectionnez **Signal d'arrêt** pour régler le volume du carillon en mélodie descendante.
- Sélectionnez **Programme/Accueil** pour configurer les Signaux vocaux, qui sont des signaux spécifiques à des environnements. Lorsque des programmes sont activés, le signal par défaut correspond à l'environnement sélectionné (par exemple, l'utilisateur entend « Plein air » lorsque le programme Plein air s'active). Ouvrez le menu déroulant sous **Stimulus** pour modifier le signal vocal (par exemple, l'utilisateur peut choisir d'entendre « Golf » lorsque le programme Plein air s'active). [Fig. 8]

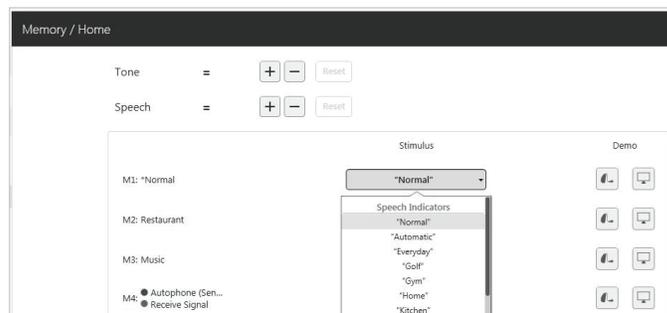


Figure 8


## Résumé d'adaptation

Sélectionnez **Résumé d'adaptation** dans la barre de navigation de gauche. [Fig. 9]

Sélectionnez **Détails** pour modifier le statut des fonctions, si nécessaire. Les détails sont des liens hypertextes qui permettent d'atteindre les écrans de réglage des noms des fonctions.

Sous **Statut**, sélectionnez le réglage souhaité dans le menu déroulant pour Marche/Arrêt auto. Activé, Marche/Arrêt auto permet aux aides auditives de passer automatiquement en mode économie d'énergie lorsqu'elles sont inutilisées. Cette fonction est disponible uniquement sur les aides auditives AI.

Sélectionnez **Imprimer** pour générer un rapport d'adaptation, un rapport Data Logging ou un guide de l'appareil personnalisé contenant les réglages de volume, les programmes et les signaux vocaux activés. Le Guide de l'appareil est proposé en plusieurs langues à partir de l'écran Imprimer.

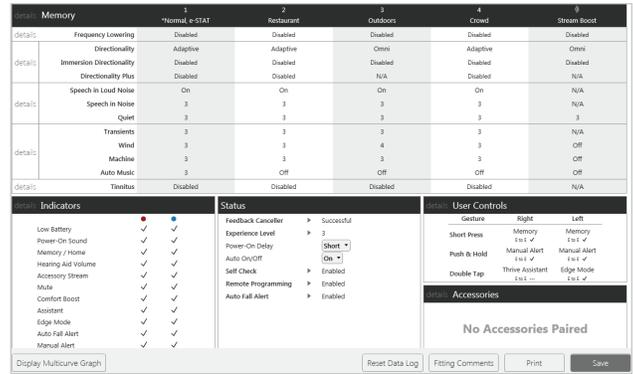

Memory	1	2	3	4	5
Details	Frequency Lowering	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
	Directionality	Adaptive	Adaptive	Omni	Adaptive
	Immersion Directionality	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
	Directionality Plus	Disabled	Disabled	N/A	Disabled
	Speech in Loud Noise	On	On	On	On
	Speech in Noise	3	3	3	3
	Quiet	3	3	3	3
	Transients	3	3	3	3
	Wind	3	3	4	3
	Machine	3	3	3	3
	Auto Music	3	Off	Off	Off
Details	Trinusus	Disabled	Disabled	Disabled	N/A

Indicators	Status	User Controls
Low Battery	Feedback Canceller	Gesture
Power On Sound	Experience Level	Right
Memory / Home	Auto On/Off	Memory
Hearing Aid Volume	Self Check	Manual Alert
Accessory Stream	Remote Programming	Push & Hold
Mute	Auto Fall Alert	Three Assistant
Comfort Boost		Edge Mode
Assistant		Manual Alert
Edge Mode		Edge Mode
Auto Fall Alert		Manual Alert
Manual Alert		Edge Mode

Figure 9

## Chargeur standard, chargeur pour intra-auriculaires et Mini Turbo Chargeur

Veuillez vous référer aux QuickTIPs Chargeur 2,4 GHz ou Mini Turbo Chargeur 2,4 GHz pour en savoir plus.



Chargeur standard



Mini Turbo Chargeur



Chargeur intra-auriculaires